

MASQUE RÉUTILISABLE PORTE-FILTRE PHM®



DESRIPTIF DU PRODUIT


Le masque PHM® est un masque porte-filtre réutilisable qui assure une bonne étanchéité au niveau du visage. Son confort permet une utilisation prolongée sur une journée complète avec un changement de filtres toutes les 8 heures.

Assurant une meilleure respirabilité, un grand confort et un gain économique, il est une alternative écologique et durable aux masques jetables et aux masques lavables testés selon le référentiel DGA/DGE.

Le masque PHM® est composé de deux coques en plastique biocompatible lavable entre lesquelles se clipse un filtre jetable PHM® à usage unique :

- une coque extérieure en plastique semi-rigide, facilement démontable,
- une coque intérieure en plastique souple, permet un ajustement confortable sur le visage avec une couverture du nez et du menton.

Le masque offre un confort d'utilisation et une performance optimale grâce aux deux élastiques de maintien réglables tête et cou.

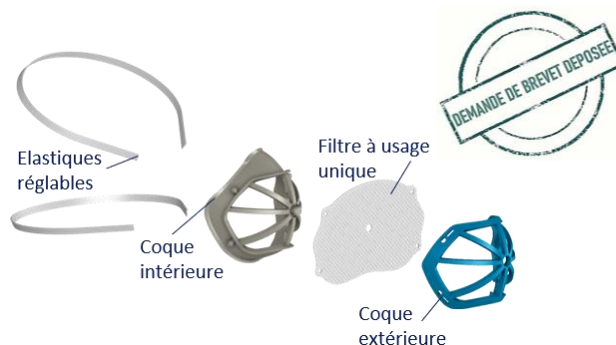

CHOIX DES FILTRES

| Filtration | Référentiel | Utilisation | Taux de filtration Particules 3µm | Taux de filtration Particules 0,6µm | Confort respiratoire |
|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Filtre PHM-CAT1 | DGE/DGA | Les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public (catégorie 1) L'usage de ces masques est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. | > 90%* | NA | Perméabilité à l'air à 100 Pa > 96L/m²/s* |
| Filtre PHM-FFP2 | EN 143/ EN 149 | Protection du porteur du masque contre l'inhalation de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air. | > 99% | > 94% | Résistance à l'inspiration < 2,4 mbar à 95L |

**Performance sur masque à usage non sanitaire vérifié par la DGA et le CEA (organisme accrédité)
Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745, ni un EPI au sens du UE/2016/245
NA : Non Applicable*

INFORMATIONS TECHNIQUES

Masque PHM® proposé en 3 tailles S-M-L pour s'adapter à toutes les dimensions et formes de visage. Ne peut être utilisé sans filtres.

Poids : 70 g

Durée de vie : 2 ans**

**dans les conditions normales d'utilisation



Mesure du coin interne de l'œil au bas du menton

Taille S : 10,5 cm

Taille M : 11,5 cm

Taille L : 12,5 cm

- Filtration de plus de 90% des projections de gouttelettes
- Confort respiratoire pour une utilisation longue durée
- Pas de gêne visuelle
- Pas de gêne d'élocution
- Alternative durable et économique aux masques jetables
- Compatible lunettes et visières

PRIX DE VENTE

Kit masque PHM® : 19,90 €TTC

Recharges filtres PHM® :

- Barrière Catégorie 1 : 10 €TTC/25 filtres
- Filtres FFP2 : 12 €TTC/ 25 filtres

CONDITIONNEMENT

Kit masque PHM® comprenant un masque porte-filtre, une recharge de 10 filtres barrières catégorie 1.

Kit de recharges économiques comprenant 25 filtres jetables (Cat.1 ou FFP2).

Conditionnement par palette possible pour les commandes groupées.

ENTRETIEN

Lavage du masque : nettoyer les coques à l'eau savonneuse ou aux lingettes désinfectantes.

Changer le filtre **toutes les 8 heures**.

Le filtre usagé doit être éliminé selon les recommandations d'usage.



Ref :
PHM-S-001
PHM-M-001
PHM-L-001









Les filtres peuvent être achetés séparément. Disponibles en 3 tailles

Ref. :
PHM-CAT1
PHM-FFP2



BIEN CHOISIR SON MASQUE

EFFICACITE DE FILTRATION

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|--|---|---|
| TYPE DE MASQUE | Masque barrière en tissu | Masque porte-filtre avec filtre catégorie 1  | Masque chirurgical | Masque FFP2 bec de canard | Masque porte-filtre avec filtre FFP2  | Masque porte-filtre FFP3 |
| Norme de référence | AFNOR S76-001 | DGE/DGA | NF EN 14683 | EN 149 | EN 1827 | EN 1827 |
| Taux de filtration des particules 3 µm | Cat 2 >70% | Cat 1 >90% | ≥ 95% à 98% | NA | NA | NA |
| Taux de filtration particules 0,6 µm | NA | NA | NA | P2 ≥ 94% | P2 ≥ 94% | P3 ≥ 99,95% |
| Public visé | Grand public | Grand-public, Professionnels, Paramédical | Médical, Paramédical | Industrie, Médical | Industrie, Médical, Paramédical | Industrie spécifique (amiante...) |
| Protection porteur | Non | Partielle | Non | Oui | Oui | Oui |
| Protection des tiers | Partielle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Port de lunettes | Oui mais buée | Oui & compatible visières | Oui mais buée | Oui mais buée | Oui & compatible visières | Non |
| Durée d'utilisation | ++ | +++ | + | + | +++ | +++ |
| Réutilisable | Lavable X fois selon norme AFNOR | Masque oui. Filtre jetable toutes les 8 h | Non | Non | Masque oui. Filtre jetable toutes les 8 h | Masque oui. Filtres jetables. |
| Coût d'usage | + | + | +++ | +++ | + | + |
| Production déchets | Faible | Moyenne | Fort | Fort | Moyenne | Moyenne |
| Confort respiratoire | ++ | +++ | + | + | +++ | + |

NA : Non Applicable

COUT D'UTILISATION

Coût d'usage des filtres PHM® entre 0,40 €TTC (Cat 1) et 0,48 €TTC (FFP2) par jour.

Votre masque PHM® est amorti en moins d'un mois, comparé à un masque jetable FFP2 ou chirurgical dont le coût d'usage est compris entre de 1 €HT et 5 €HT /jour.

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DU MASQUE PHM®

